

機械器具 74 医薬品注入器
高度管理医療機器 止血剤注入キット 70397000

ベリ P スネーク

*(0.5/1/3/5mL 用)

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

注入・塗布する止血剤は、ヘッドのテーパ部にセットしたシリンジを押し力により調節する。又、ノズル形状の支持体としてステンレス線を内蔵しているためノズル形状を適宜に変更でき、目的部位への注入・塗布が容易である。

* <構造図(代表図)>

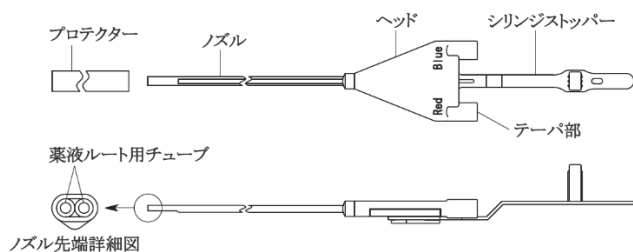

- 1) ヘッド: ABS 樹脂
- 2) ノズル及び薬液ルート: フッ素樹脂
- 3) 本品の併用医薬品はベリプラストPコンビセット、併用医療機器はオスルーテーパを有するシリンジ。


【使用目的又は効果】

止血剤の注入に用いる。

* 【使用方法等】


1.使用前準備

医薬品の調製方法に従って溶解された止血剤A液(Blue 側)・B液(Red 側)の入ったシリンジをバレルホルダーに固定し、プランジャーホルダーをプランジャー端部に固定する。

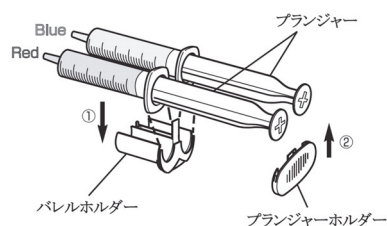


2.本品準備


- 1) プロテクターを外す。

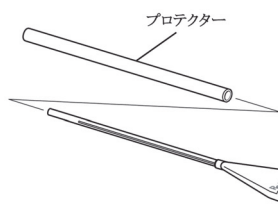


- 2) 薬液を充填したシリンジをヘッドのテーパ部に接続し、シリンジストッパーをバレルホルダーの凸部に固定する。

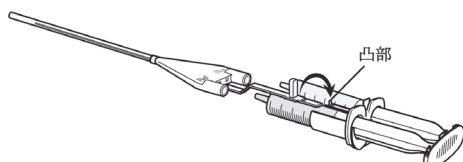

- 3) シリンジのプランジャーを押し、目的部位に止血剤を注入・塗布する。

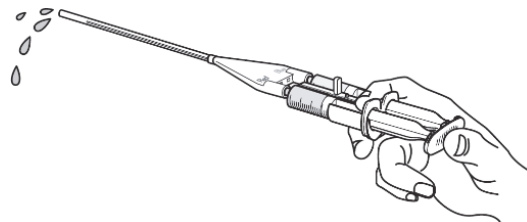

- 4) 状況に応じ、ノズル形状を適宜変えて使用する。

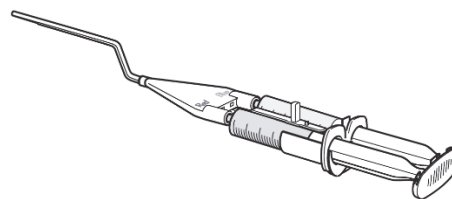

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 1) 使用の際は、汚染に十分注意すること。
- 2) 接続部に薬液が付着している場合は、薬液を拭き取りシリンジと接続すること。
[接続部に緩みが生じる恐れがある。]
- 3) ベリプラスト® 付属のシリンジを使用し、確実に接続すること。
[接続部からの薬液漏れが生じる恐れがある。]
- 4) ノズル先端部へは、強い衝撃を与えないこと。
[先端が変形し、薬液の注入・塗布ができなくなる。]
- 5) ノズルを鉗子等でつまむ際は注意してつまむこと。また、はさみ又は鋭利な鉗子等を用いて把持しないこと。
[ノズルに傷やつぶれが生じ、漏れや閉塞に繋がる恐れがある。]
- 6) ノズルの任意の1点を90度以上曲げて使用しないこと。
[薬液ルート用チューブが閉塞する恐れがある。]
- 7) ノズルを屈曲させた状態でトコカールスリーブ等から抜き取らないこと。
[ノズルがヘッドから外れる恐れがある。]
- 8) 薬液ルート用チューブが閉塞した場合は、ノズル先端部に付着した薬液を完全に拭き取り、更にエアあるいは生理食塩液等により薬液ルート用チューブ内に残存した薬液を除去すること。
[薬液が詰まり、注入・塗布ができなくなる。]
- 9) シリンジを付け替える場合は、前と同じルートに接続すること。
[薬液ルート用チューブが閉塞する。]
- 10) 薬液の注入・塗布を中断する際は、ノズル先端部に付着した薬液を完全に拭き取り、シリンジのプランジャーを少し引き、液だれを防止すること。
[薬液が詰まり、注入・塗布ができなくなる。]

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

本品は「ベリプラストPコンビセット」専用のため、別用途で使用しないこと。

<不具合・有害事象>

手技に伴い、一般的な不具合や有害事象が発生する恐れがある。有害事象が発生した場合は術者の知見に基づき、適切な処置を行うこと。

- 1) その他の不具合

- ① 本品破損
- ② 漏れ
- ③ 詰まり

- 2) 重大な有害事象

- ① 感染

3) その他の有害事象

- ① アレルギー反応

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水ぬれ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。

＜有効期間＞

箱に記載している使用期限を参照のこと。（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社八光

TEL 026-275-0121

＜製造業者＞

株式会社八光

** 供給会社:

CSL ベーリング株式会社

くすり相談窓口 TEL 0120-534-587