

機械器具 74 医薬品注入器
高度管理医療機器 止血剤注入キット 70397000
ベリプラス調製器セット
(微量滴下セット、シンプルチップセット)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造


本品は、以下のセット品毎に販売している。
各セット品の構成品は以下のとおりである。

1) 微量滴下セット


- (1) 1mLロック付きシリンジ 青目盛：1本、赤目盛：1本

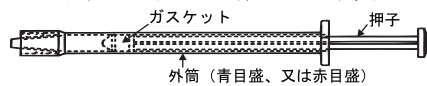

- (2) 逆止弁付きジョイントチューブ 青コネクタ：1本、赤コネクタ：1本

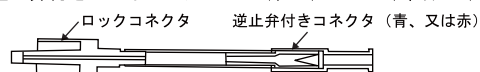


- (3) フレキシブルニードル：2本

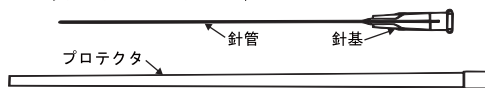

2) シンプルチップセット

- (1) 5mLロック付きシリンジ 青目盛：1本、赤目盛：1本

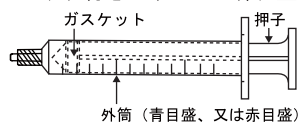

- (2) スプレーチップ：4個



2. 材質

1mLロック付きシリンジ	ポリプロピレン
5mLロック付きシリンジ	スチレン系熱可塑性エラストマー
逆止弁付きジョイントチューブ	ポリ塩化ビニル ポリカーボネート シリコーンゴム
フレキシブルニードル	ステンレス鋼 ポリプロピレン
スプレーチップ	ポリアセタール

ポリ塩化ビニルの可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシルである。

【使用目的又は効果】

本品は主に2種類の薬液を混合しつつ注入する為の医薬品注入器である。

本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。


【使用方法等】

1. 使用方法


1) 微量滴下セットの使用方法

微量滴下セットは患部に薬液を1液ずつ交互に微量滴下して使用します。

- (1) 調製方法に従って溶解されたフィブリノゲン液及びトロンビン液を1mLロック付きシリンジに充填します。
- (2) 目盛と同じ色の逆止弁付きジョイントチューブの逆止弁付きコネクタと1mLロック付きシリンジを接続し、ロックコネクタにはフレキシブルニードルを接続します。(図1参照)

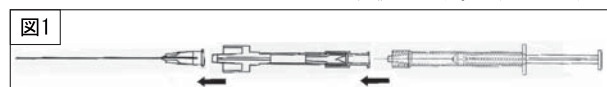

- (3) 1mLロック付きシリンジの押子を押し、薬液をフレキシブルニードル先端まで満たします。その後、逆止弁付きジョイントチューブをポンピングすることにより、フレキシブルニードル先端から薬液を患部へ微量に滴下します。(図2-(a)参照)
- (4) 本品は1mLロック付きシリンジを取り外したり、フレキシブルニードルを折り曲げて薬液を滴下することもできます。(図2-(b)～図2-(d)参照)

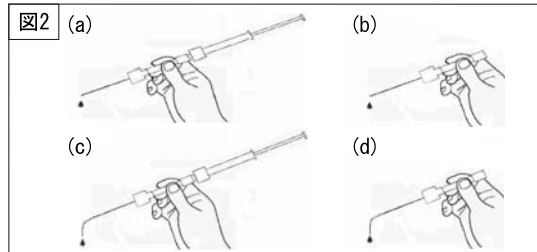


- (5) フィブリノゲン液とトロンビン液を交互に滴下します。

2) シンプルチップセットの使用方法

シンプルチップセットは患部に薬液を1液ずつ交互に噴霧して使用します。

- (1) 調製方法に従って溶解されたフィブリノゲン液及びトロンビン液を5mLロック付きシリンジに充填します。
- (2) 5mLロック付きシリンジの先端部にスプレーチップを装着します。
- (3) フィブリノゲン液とトロンビン液を交互に噴霧します。(図3参照)

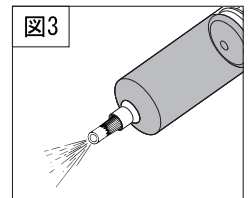

2. 組み合わせて使用する医薬品

本品は以下の医薬品と組み合わせて使用します。

- 1) 販売名：ベリプラスP コンビセット 組織接着用
承認番号：22100AMX01695

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. フレキシブルニードルを極端に曲げないでください。[針管が閉塞して塗布が困難になったり、破損のおそれがあります。]
2. 本品を塗布部位に接触させないように注意してください。
3. 詰まりが発生した際には新しい製品に付け替えてください。[薬液硬化のおそれがあります。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中 は本品の破損、接続部の緩み及び薬液漏れ等について注意すること。
- 2) 本品を使用して血管内への薬液の注入を行わないこと。[血管閉塞のおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

微量滴下セット 有効期間：滅菌後3年（自己認証による）

シンプルチップセット 有効期間：滅菌後4年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：03-5684-5611

製造

ニプロ医工株式会社

使用方法説明書を必ずご参照ください。



ニプロ株式会社