

フレキシブルニードル

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、刃先のない変形自在な高延性の針管と針基から構成されている。

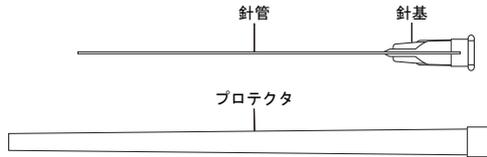

2. 材質

針管：ステンレス鋼
針基：ポリプロピレン又は真鍮

【使用目的又は効果】

本品は滅菌済みであるのでそのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) ベリプラスト調製器セットの構成部品であるシリンジ、又はフォークコネクタに本品を接続します。
- 2) 生体組織内へ生体組織接着剤を塗布します。

2. 組み合わせて使用する医薬品・医療機器

本品は以下の医薬品・医療機器と組み合わせて使用します。

- 1) 販売名：ベリプラストP コンビセット 組織接着用
承認番号：22100AMX01695
- 2) 販売名：ベリプラスト調製器セット
承認番号：16300BZZ02410000

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 本品を極端に曲げないでください。[針管が閉塞して塗布が困難になったり、破損のおそれがあります。]
2. 本品を塗布部位に接触させないよう注意してください。
3. 詰まりが発生した際には新しい製品に付け替えてください。
[薬液硬化のおそれがあります。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について注意すること。

2. 不具合・有害事象

- 1) その他の不具合
 - (1) 本品の破損
 - (2) 接続部の緩み
 - (3) 液漏れ
 - (4) 詰まり

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後3年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：03-5684-5611

製造

ニプロ医工株式会社