

## ベリプラストシングルスプレーセット

### 再使用禁止

#### 【警告】

##### 1. 使用方法

1) 本品を使用する際には、シングルスプレーヘッドを組織に近づけ過ぎず、ガス圧は117.6kPa (1.2kgf/cm<sup>2</sup>) 以上に圧力を上げないよう留意すること。【空気塞栓、ガス塞栓のおそれがある。】

#### 【禁忌・禁止】


##### 1. 使用方法

1) 再使用禁止

### \*【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

本品はシングルスプレーヘッド（2個）、エアフィルターライン（1個）、先端クリップ（1個）よりなるセット品である。

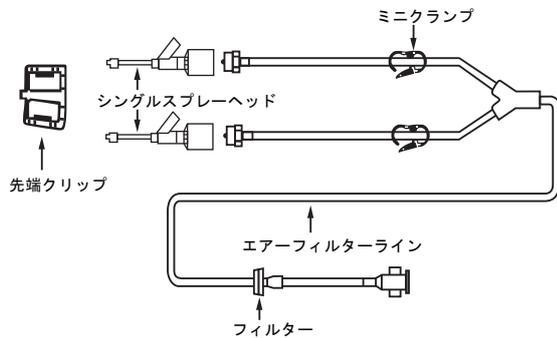

シングルスプレーヘッドには下図のように外カバーが装着される場合がある。



#### 2. 材質

シングルスプレーヘッド	ポリプロピレン、ステンレス鋼
-------------	----------------

#### 【使用目的又は効果】

- ・本品は生体組織接着剤を患部に噴霧するための医薬品注入器である。
- ・本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

#### 【使用方法等】

##### 1. 使用方法 [先端クリップを使用しない場合]

- 1) 調製方法に従って溶解されたA液、B液の入った注射筒を注射筒目盛と同色のシングルスプレーヘッドに装着します。  
なお、装着の際には注射筒のチップをアダプターの奥まで挿入し、シングルスプレーヘッドと接続が確実に行われるようにします。
- 2) 各シングルスプレーヘッドにエアフィルターラインの先端（無色透明）を回転させながら挿入し、固定します。
- 3) ガス圧力調整器のコネクタにエアフィルターラインの先端（赤色）を回転させながら挿入し、固定します。
- 4) ガス圧を73.6～117.6kPa (0.75～1.2kgf/cm<sup>2</sup>) に調整します。ガス圧力調整器添付の取扱説明書を参照します。
- 5) エアフィルターラインに装着されておりミニクランプにて、エアーの[ON][OFF]を調整します。
- 6) プランジャーを押すことにより、薬剤が霧状に噴霧されます。
- 7) 薬剤の噴霧箇所に応じて、シングルスプレーヘッドのノズルを自由に折り曲げます。

##### 2. 使用方法 [先端クリップを使用する場合]

- 1) 調製方法に従って溶解されたA液、B液の入った注射筒をバレルホルダーに固定します。
- 2) プランジャーをプランジャーホルダーで固定します。
- 3) 各シングルスプレーヘッドを注射筒目盛と同色の注射筒に装着します。
- 4) シングルスプレーヘッドの先端に先端クリップを装着します。
- 5) 各シングルスプレーヘッドにエアフィルターラインの先端（無色透明）を回転させながら挿入し、固定します。
- 6) ガス圧力調整器のコネクタにエアフィルターラインの先端（赤色）を回転させながら挿入し、固定します。
- 7) ガス圧を73.6～117.6kPa (0.75～1.2kgf/cm<sup>2</sup>) に調整します。ガス圧力調整器添付の取扱説明書を参照します。
- 8) エアフィルターラインに装着されておりミニクランプにて、エアーの[ON][OFF]を調整します。
- 9) プランジャーを押すことにより、薬剤が霧状に噴霧されます。
- 10) 薬剤の噴霧箇所に応じて、シングルスプレーヘッドのノズルを自由に折り曲げます。

##### 3. 組み合わせて使用する医薬品

本品は以下の医薬品と組み合わせて使用します。

- 1) 販売名：ベリプラストP コンビセット 組織接着用  
承認番号：22100AMX01695

##### 4. 組み合わせて使用する医療機器又は設備

本品は以下の医療機器又は設備に接続して使用する場合があります。

- 1) 一般的名称：高圧ガスレギュレータ
- 2) 医療ガス配管設備（JIS T 7101）に適合する設備

#### 【使用上の注意】

##### \*1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び薬液漏れ等について注意すること。
- 2) 本品を使用して血管内への薬剤の注入を行わないこと。  
【血管閉塞のおそれがある。】

##### 【保管方法及び有効期間等】

###### 1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

###### 2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後4年 [自己認証（自社データ）による]

##### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：03-5684-5611

製造

ニプロ医工株式会社

\*\*供給

CSLベーリング株式会社

くすり相談口 TEL 0120-534-587

使用方法説明書を必ずご参照ください。



ニプロ株式会社